



## Panel de control

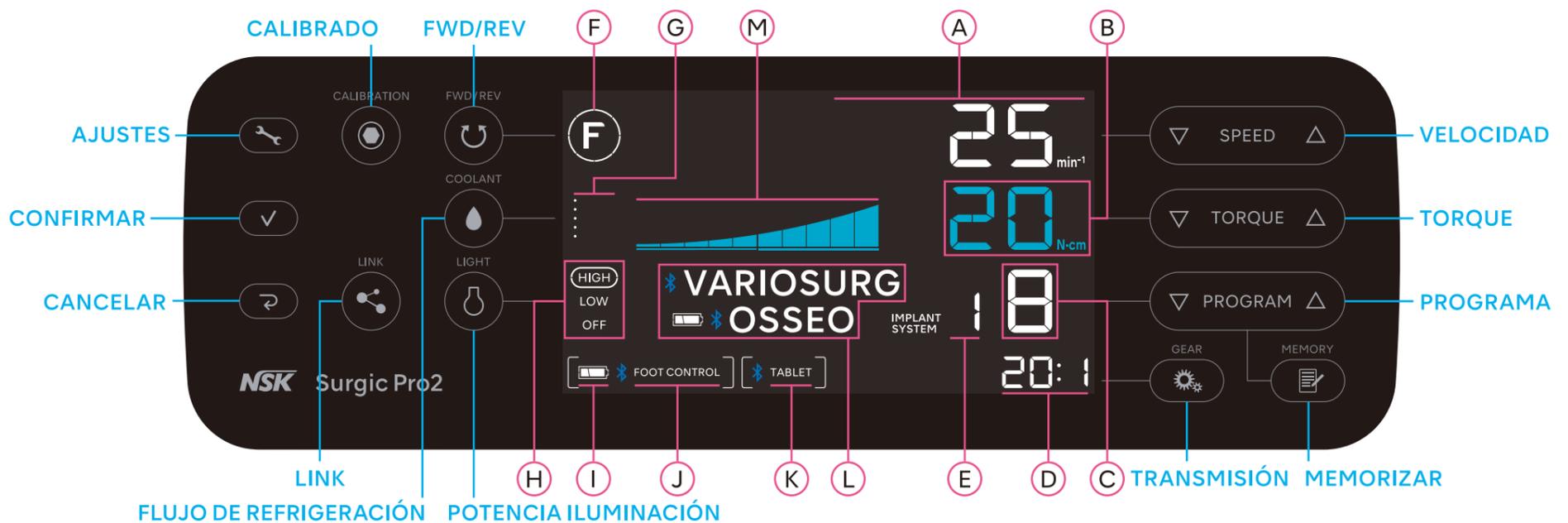


## Pedal de control

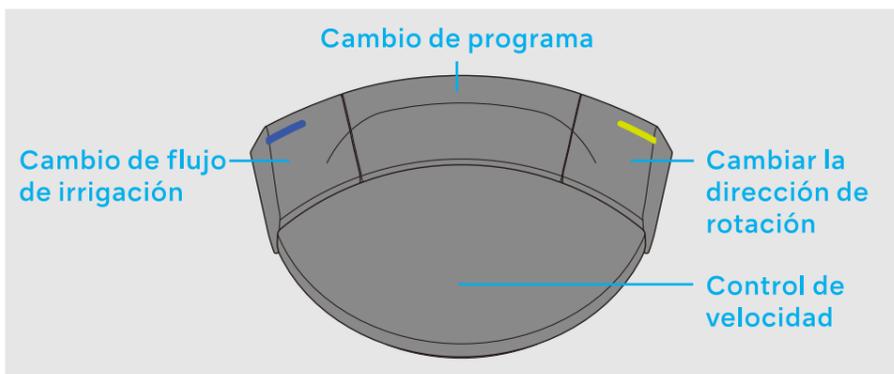

A	Velocidad de rotación	I	Nivel de batería del pedal de control
B	Torque	J	Estado de la conexión con el pedal de control
C	Número de programa	K	Estado de la conexión entre un dispositivo de control externo y el dispositivo
D	Transmisión seleccionada	L	Estado de la conexión con el VarioSurg3 y el Osseo100+
E	Nº de sistema de implantes	M	Nivel de torque actual
F	Dirección de la rotación		
G	Nivel del flujo de irrigación		
H	Nivel de iluminación		

## Preparación para su uso

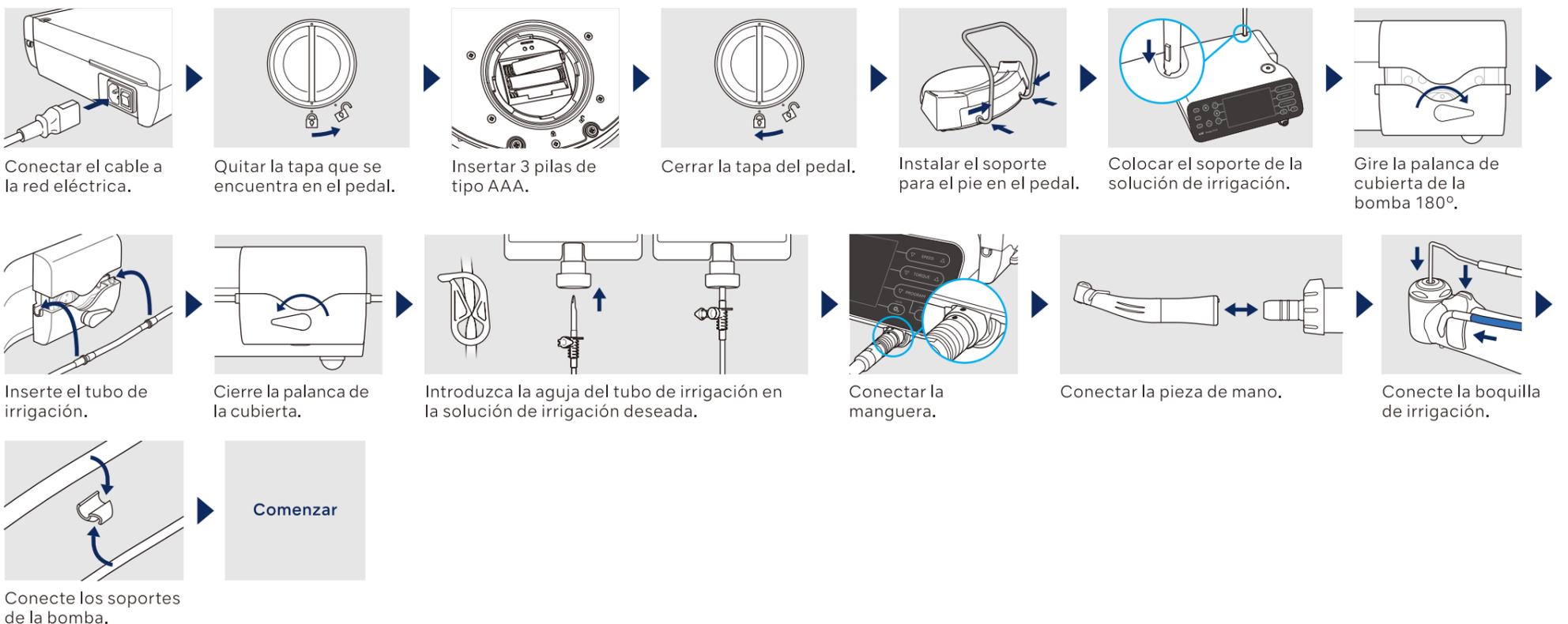

## Inicio



# Primeros Pasos (Conectar con todos los dispositivos)

**1**

Mínimo 2 segs.

Presione y mantenga el botón de AJUSTES. Aparecerá "BLE SET".

**2**

Presione la tecla CONFIRMAR.

**3**

Presione la tecla TORQUE para seleccionar el dispositivo. AVISO: a excepción de "BLE SET" y "PAIRING", todas los textos de la pantalla parpadean.

**Pedal de control**

PAIRING FC

**Osseo 100+**

PAIRING OS

**VarioSurg3**

PAIRING LK

**Dispositivo externo**

PAIRING PC

Presione la tecla CONFIRMAR.

## ▼ Pedal de control

Esta operación no es necesaria cuando se utiliza el SurgicPro2 por primera vez. Cuando el pedal está desconectado o cuando se utiliza un nuevo pedal de control recién comprado, siga los siguientes pasos. AVISO: la conexión se puede realizar dentro de los 10 minutos posteriores a la inserción de la batería del pedal de control.

Presione la tecla CONFIRMAR.

Aprox. 10 segs.

Presione y mantenga presionados los botones izquierdo y derecho y el pedal al mismo tiempo.

PAIRING OK

Conectado

La unidad de control emite un pitido y posteriormente aparecerá "OK" en la pantalla. La conexión es correcta. Asegúrese que el dispositivo está conectado.

Presione la tecla CANCELAR para volver a la pantalla principal.

## ▼ Osseo 100+

Encender

Presione el botón de encendido para encender el dispositivo.

Aprox. 3 segs.

Presione y mantenga presionado el botón de encendido.

"PA" aparecerá en la pantalla.

PAIRING OK

Conectado

La unidad de control emite un pitido y posteriormente aparecerá "OK" en la pantalla. La conexión es correcta. Asegúrese que el dispositivo está conectado.

Presione la tecla CANCELAR para volver a la pantalla principal.

## ▼ VarioSurg3

Encienda el dispositivo.

Conecte el cable link antes de nada.

Presione y mantenga pulsado el botón.

Cuando la luz LED, empiece a parpadear en azul, suelte el botón.

PAIRING OK

Conectado

La unidad de control emite un pitido y posteriormente aparecerá "OK" en la pantalla. La conexión es correcta. Asegúrese que el dispositivo está conectado. Además, la luz LED del módulo de enlace se iluminará en verde.

Presione la tecla CANCELAR para volver a la pantalla principal.

## ▼ Dispositivos externos

Abra la App.

Lo primero de todo, instale la aplicación.

Presione el icono superior.

Presione "Start".

Bluetooth Pairing Request

"SurgicPro2" would like to pair with your iPad. Enter the code shown on "SurgicPro2".

Cancel Pair

Introduzca el código "123456" y presione "Pair"

PAIRING OK

Conectado

La unidad de control emite un pitido y posteriormente aparecerá "OK" en la pantalla. La conexión es correcta. Asegúrese que el dispositivo está conectado.

Presione la tecla CANCELAR para volver a la pantalla principal.



[www.nsk-dental.com/qr/app-surgicpro2](http://www.nsk-dental.com/qr/app-surgicpro2)